

**Posizionamento Sicuro**

L'ampia parte esterna si ripiega comodamente ed è progettata per tenere il dispositivo in posizione.

**Uso 24 ore su 24**

Può essere indossato ininterrottamente per un massimo di 24 ore.

**Facilità d'uso**

Applicatore per facilitare l'inserimento.

**Flessibilità e Comfort**

Realizzato in morbido silicone e riempito di un fluido omogeneo, l'inserto è accuratamente realizzato per garantire un inserimento confortevole e per adattarsi e seguire i movimenti.


**Igienico**

Applicatore in plastica per aumentare l'igiene.


# UN INSERTO MORBIDO IDEATO PER ESSERE COMODO

Navina Insert è un inserto morbido e flessibile progettato per garantire una completa protezione fino a 24 ore e prevenire le perdite accidentali intestinali. L'inserto è pensato per garantire la massima igiene ed realizzato in silicone morbido con un fluido all'interno, che gli consente di conformarsi, muoversi e adattarsi al corpo.

## Istruzioni dettagliate

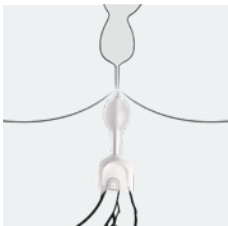


**1.** Reggere l'inserto prelubrificato mediante l'applicatore di plastica bianca e allineare la punta del bulbo con l'ano.

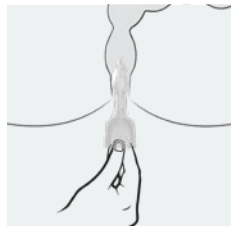

**2.** Spingere delicatamente l'inserto fino a quando la parte esterna più larga poggia sull'ano. Estrarre l'applicatore e smaltirlo con i rifiuti indifferenziati.



**3.** L'inserto riempito di fluido segue le linee del corpo e consente di prevenire le perdite.

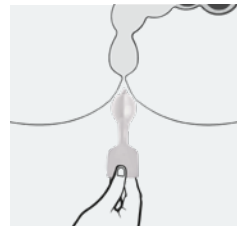

**4.** Per rimuovere il dispositivo, afferrare la parte esterna e tirare delicatamente per estrarre l'inserto. Smaltire l'inserto con i rifiuti indifferenziati.

Codice Prodotto	Codice PARAF	Descrizione	Confezionamento	Utilizzo
6930430	982182014	Navina Insert, Standard	30 pezzi	Monouso
6930530	982182026	Navina Insert, Large	30 pezzi	Monouso
6930630	982182040	Navina Insert, Starter Pack	5 pezzi Standard e 5 pezzi Large	Monouso

Codice ISO 09.31.06.003



#### Navina Bowel Care

Sappiamo che la gestione dell'intestino è qualcosa di estremamente personale, ed è per questo che siamo orgogliosi di poter offrire una gamma di soluzioni su misura, in grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo paziente, tutte sotto un unico marchio che promette la stessa qualità, facilità d'uso e flessibilità indipendentemente dalla scelta del prodotto.

In Wellspect sviluppiamo soluzioni innovative per la cura della continenza che migliorano la qualità della vita delle persone con problemi alla vescica e all'intestino. Ci impegniamo a supportare i nostri utilizzatori ad accrescere la fiducia in se stessi e l'indipendenza, prendendosi cura della propria salute e del proprio benessere. Siamo leader del settore da oltre 40 anni con i nostri marchi di prodotti LoFric® e Navina™. Miriamo sempre a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti e ci impegnamo con passione per raggiungere l'impatto zero per il clima. Collaboriamo con utilizzatori e professionisti sanitari per migliorare i risultati clinici in modo sostenibile, ora e in futuro.

**Wellspect. A Real Difference.**

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e i servizi, visita [Wellspect.it](https://wellspect.it).

Seguici su LinkedIn, YouTube e Instagram.

**wellspect.it**

Wellspect s.r.l, Via Isonzo 65, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italy. Numero verde gratuito 800 010601

#### Navina Fecal Incontinence Insert



Rx Only



Fabbricante:  
Minnesota Medical Technologies  
2446 Henry Road Northwest  
Stewartville, MN 55976 USA  
507-533-0366  
[www.mnmedicaltechnologies.com](http://www.mnmedicaltechnologies.com)  
540035 Rev 1

Importatore:  
Wellspect HealthCare  
Aminogatan 1  
PO Box 14, SE-431 21  
Mölnådal, Sweden.  
[www.wellspect.com](http://www.wellspect.com)

MPS Medical Product Service GmbH  
Borngasse 20  
Braunfels 35619  
Germany