
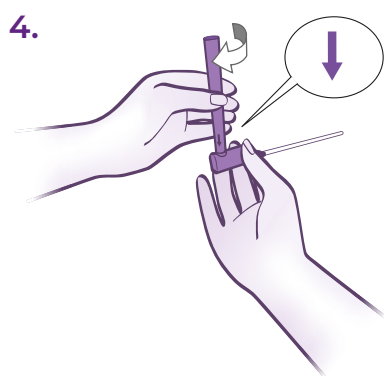


# Cateteri LoFric Elle Pro – Guida rapida

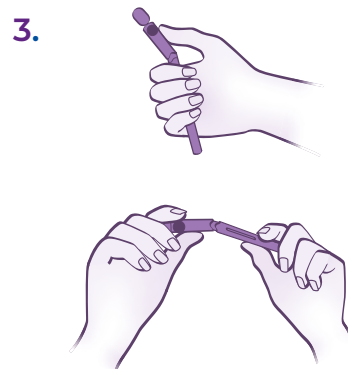

1. Lava accuratamente le mani con acqua e sapone.
2. Apri il cappuccio superiore.
3. Tieni il catetere con una mano e piega delicatamente la parte superiore per aprirlo. Estrai il catetere.
4. Collega il contenitore al catetere con una leggera rotazione. Assicurati che la freccia sul contenitore sia rivolta verso il basso.
5. Inclina il bacino verso l'alto, divarica le labbra e tira delicatamente verso l'alto per individuare l'uretra. L'uretra si trova appena sopra l'apertura

vaginale. Con l'altra mano, inserisci lentamente il catetere nell'apertura uretrale fino a quando l'urina inizia a scorrere. Fai avanzare leggermente il catetere per garantire un flusso costante.

Attendi che il flusso di urina si interrompa, quindi estrai lentamente il catetere.

6. Rimetti il catetere nel contenitore. Smaltiscilo o portalo con te nella borsa fino al momento dello smaltimento. Attenzione! Il contenitore inferiore è riciclabile.

## Gamma di prodotti

Riferimenti	Tipo	Lunghezza	Dimensioni	N. fori	PARAF
419 10 30	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (donna)	10 cm*	CH 10	12	951853225
419 12 30	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (donna)	10 cm*	CH 12	12	951853237
419 14 30	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (donna)	10 cm*	CH 14	12	951853249

\*Lunghezza effettiva, lunghezza del catetere che può essere inserita nel corpo.

Ogni scatola contiene 30 cateteri

Codice ISO: 09.24.06.303

## Importante

LoFric® Elle™ Pro, catetere monouso idrofilo, pronto all'uso, con fori multipli, progettato per consentire lo svuotamento completo della vescica senza necessità di riposizionamento.

Per utilizzatrici donne: adulte, adolescenti e ragazze.

Per la gestione vescicale con cateterismo intermittente a breve e lungo termine.

I cateteri LoFric sono da utilizzare solo con prescrizione medica.

Assicurarsi di seguire i consigli e la formazione sulla procedura di cateterismo ricevuti dall'operatore sanitario prima dell'uso.

Per informazioni importanti e istruzioni complete, consultare le istruzioni per l'uso incluse nella confezione.

Contattare lo specialista di riferimento in caso di difficoltà.

In Wellspect, sviluppiamo prodotti e servizi innovativi per fare la reale differenza nella vita delle persone che necessitano di cure per la continenza, consentendo loro di vivere ogni giorno al massimo. Da oltre 40 anni siamo leader affidabili nel nostro settore con i nostri marchi LoFric® e Navina™ e ci impegniamo per aumentare l'offerta di soluzioni facili da usare. Ogni giorno ci impegniamo a mantenere i più elevati standard di qualità, riducendo al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Lavorando a stretto contatto con utilizzatori e professionisti sanitari, vogliamo migliorare gli esiti clinici e la qualità della vita delle persone in tutto il mondo.

**Wellspect. A Real Difference.**

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi, visitare [wellspect.it](https://wellspect.it)

Unitevi alla conversazione su LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

**wellspect.it**

Wellspect s.r.l., Via Isonzo, 65, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia. Tel: +39 800 010601.

LoFric



Fabbricante: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Numero Verde: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only